



UDSTYR

# Ernæringsprøjte



## Det skal du bruge:

- Bellyfood
- Flaskeadapter (str. 1, 12–15 mm)
- Ernæringsprøjte (60 ml anbefales)
- Evt. skål eller glas

## Sådan gør du

### 1. OMRYST POSEN

Sørg for, at maden er godt blandet, før du går i gang.

### 2. GØR MÅLTIDET KLAR

Du kan vælge den metode, der passer bedst til dig:

#### Med flaskeadapter (som vist på billedet)

Tryk adapteren i posen og træk maden op i sprøjten.

#### Uden stempel

Fyld sprøjten direkte ved at hælde maden i.

#### Fra skål eller glas

Hæld maden op og træk den op i sprøjten derfra.

### 3. INDGIV SONDEMADEN

Giv maden roligt og i et tempo, der føles behageligt.

TIP: Bland lidt af skyllevandet i for en tyndere konsistens.



### VALG AF SPRØJTE

60 ml Flergangssprøjter (af mærket Medicina eller GBUK) er ofte lettere at bruge, fordi de har en tyndere gummiring.

### SMØR SPRØJTEN

Smør gummiringen med lidt madolie efter opvask – det gør den mere smidig og lettere at bruge.

### OPBEVARING

Hvis der er rester, kan du trække maden op i sprøjten, sætte en prop på og opbevare sprøjten i køleskabet.



# Ernæringspumpe

## Kangaroo Omni pumpe

Pumpen kan bruges med Bellyfood uden at fortynde maden. Bellyfood skal hældes over i posen, der sidder på ernæringssettet. Følg vejledningen til din pumpe.

### 1. FORBEREDELSE

Vask hænder grundigt og sørg for et rent arbejdsområde.

### 2. GØR MÅLTIDET KLAR

Hæld Bellyfood over i ernæringsposen og luk posen korrekt.

### 3. INDGIV SONDEMADEN

Tilslut posen til pumpen, start pumpen og indgiv maden.

## Andre pumper

Hvis man bruger en anden pumpe, er vores erfaring at det kører bedst med Infinity og Amika pumperne. For at det fungerer bedst uden fejlmeldinger, anbefaler vi at blande 50-100 ml vand i pr. pose Bellyfood.

### BEHOLDERE:

- Bellyfoods genanvendelige flasker (passer kun til Universal ernæringssett)
- Flocare container
- Compat Flexibag

## Knapsonde

Ved brug af knapsonde anbefales forlængerslanger med lige tilkobling (ikke vinklet).

### VIGTIGT AT VIDE:

#### Maksimal hængetid

Maden må hænge i op til 2 timer ved stuetemperatur.

#### Opbevaring af rester

Sæt en prop på slangesættet efter brug og opbevar på køl.

#### Udskiftning af udstyr

Skift ernæringspose og administrationsæt hver 24. time.

**TIP:** Skriv starttid og dato på posen – kassér efter 24 timer.

Du finder Bellyfoods genanvendelige flasker på vores webshop [bellyfood.dk](http://bellyfood.dk)

